

# LAVICTA

Het gehele lichaam droogstelsel

## Gebruikers Handleiding

Wat betreft de elektrische installatie, raden we altijd aan om een professionele elektricien in te schakelen. Deze kan beoordelen of de bestaande groep kan worden gebruikt of dat er een extra groep nodig is. Het is essentieel om de veiligheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat andere apparaten niet tegelijkertijd met de lichaamsdroger worden gebruikt. Dit moet goed worden gecommuniceerd met de gebruiker en eventueel met het personeel van de thuiszorg.

## Inhoud

LAVICTA Lichaamsdroger	3
Overzicht	4
Specificatie	5
Installatie	6 & 7
Installatie op Afstand en Onderhoud	8
Werking	9
Veiligheid en Garantie	10
Contact gegevens en Garantie Formulier	11

Lees alstublieft deze gebruiker handleiding aandachtig, het bevat belangrijke informatie voor het installeren, gebruiken en onderhouden van de lichaamsdroger.

Deze gebruiker handleiding moet in een veilige plek gehouden worden voor toekomstige gebruik. Als deze handleiding overgedragen wordt zorg dan dat het bij de lichaamsdroger blijft.

Advies Lijn 06-34344072

### AANVULLEND ELEKTRISCH ADVIES

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen boven de leeftijd van 8 en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies gekregen hebben wat betreft het apparaat kunnen gebruiken op een veilige manier en in staat zijn om de gevaren te begrijpen. Kinderen moeten niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Als het netsnoer beschadigd is moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn monteur of gelijkwaardige gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen




De droger is een baanbrekend product, het revolutioneert de manier waarop jij jezelf droogt. Het is simplistisch en een genot om te gebruiken. Het is geproduceerd tot de hoogste kwaliteit en het heeft de strengste controleprocedures om te verzekeren dat jij de beste resultaten krijgt.

## ZONE 2

### Waar kan de Lavicta lichaamsdroger het best geplaatst worden?

1. Plaatsing door een elektricien: Zorg ervoor dat de installatie van de lichaamsdroger wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien om de veiligheid en juiste werking te waarborgen.
2. Zone 2 installatie: De lichaamsdroger moet worden geplaatst in zone 2 van de badkamer volgens de NEN 1010-normen voor elektrische installaties. Zone 2 verwijst naar het gebied rondom de douche of bad, waar de kans op direct contact met water klein is maar waar nog steeds vocht aanwezig kan zijn. Dit minimaliseert het risico op elektrische schokken. (IPX45)
3. Plaatsing: Zorg ervoor dat de lichaamsdroger stevig aan de muur wordt bevestigd op een geschikte hoogte voor gebruiksgemak.
4. Elektrische aansluiting: Sluit de lichaamsdroger aan op een geschikt elektrisch circuit volgens de instructies in de gebruikershandleiding en de geldende elektrische voorschriften.
5. Testen: Controleer na installatie of de lichaamsdroger correct functioneert voordat deze in gebruik wordt genomen.
6. Veiligheid: Zorg ervoor dat alle elektrische verbindingen veilig en waterdicht zijn en dat de lichaamsdroger correct is geaard om het risico op elektrische schokken te minimaliseren.
7. Onderhoud: Regelmatig onderhoud en inspectie zijn essentieel om de veilige werking van de lichaamsdroger te behouden. Volg de onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding nauwkeurig op.

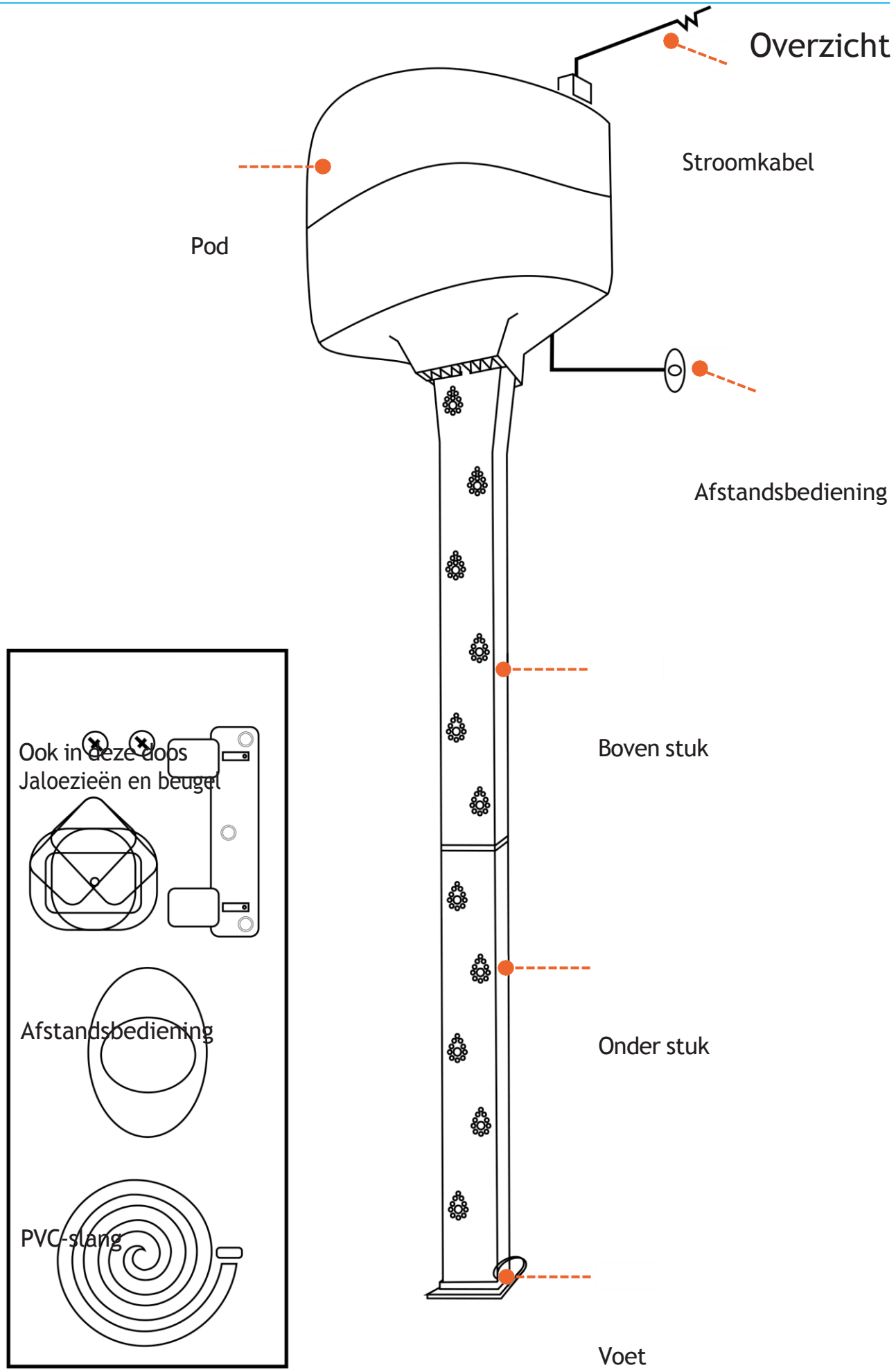



Ook in deze doos  
Jaloezieën en beugel

Afstandsbediening

PVC-slang



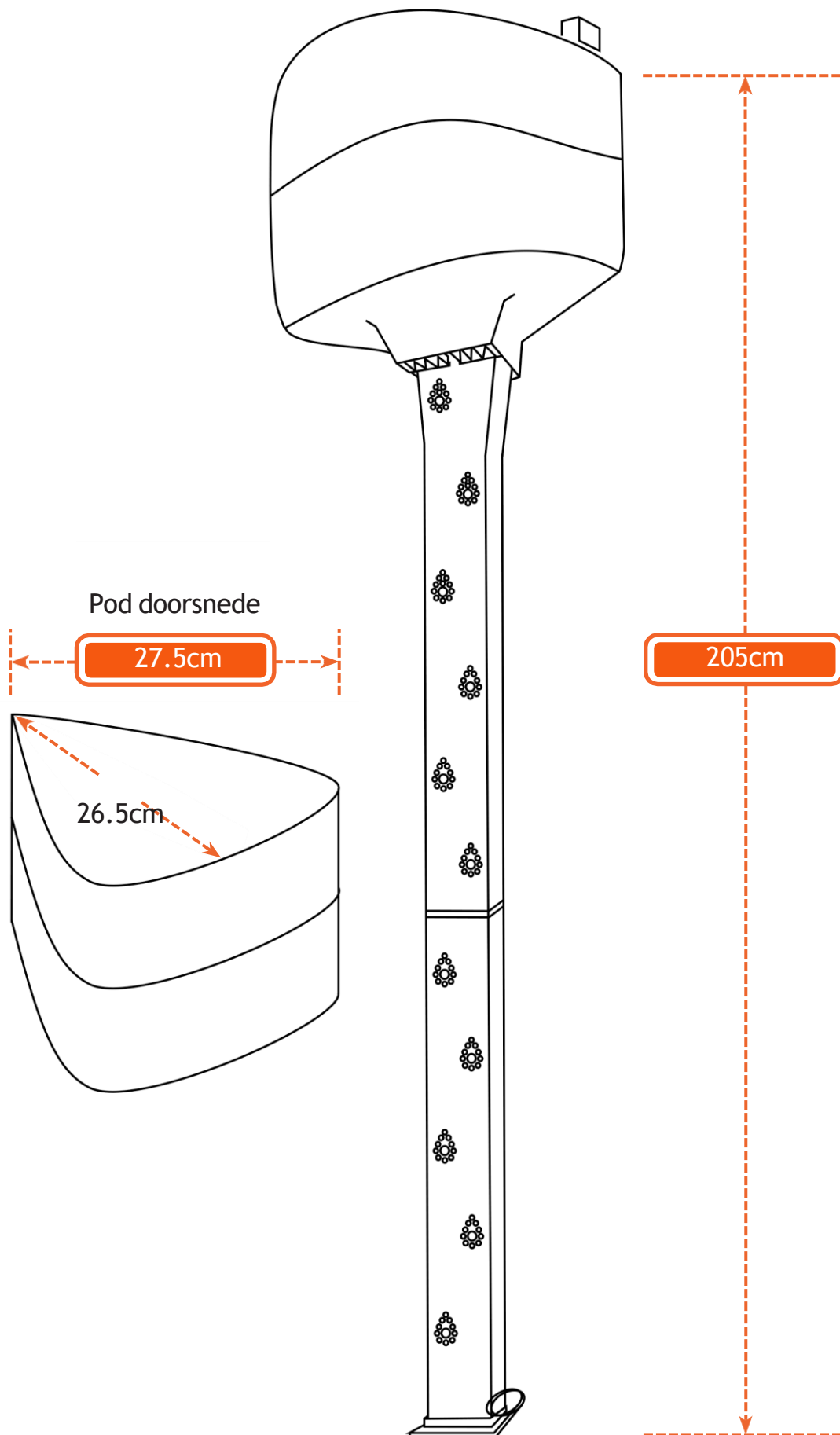

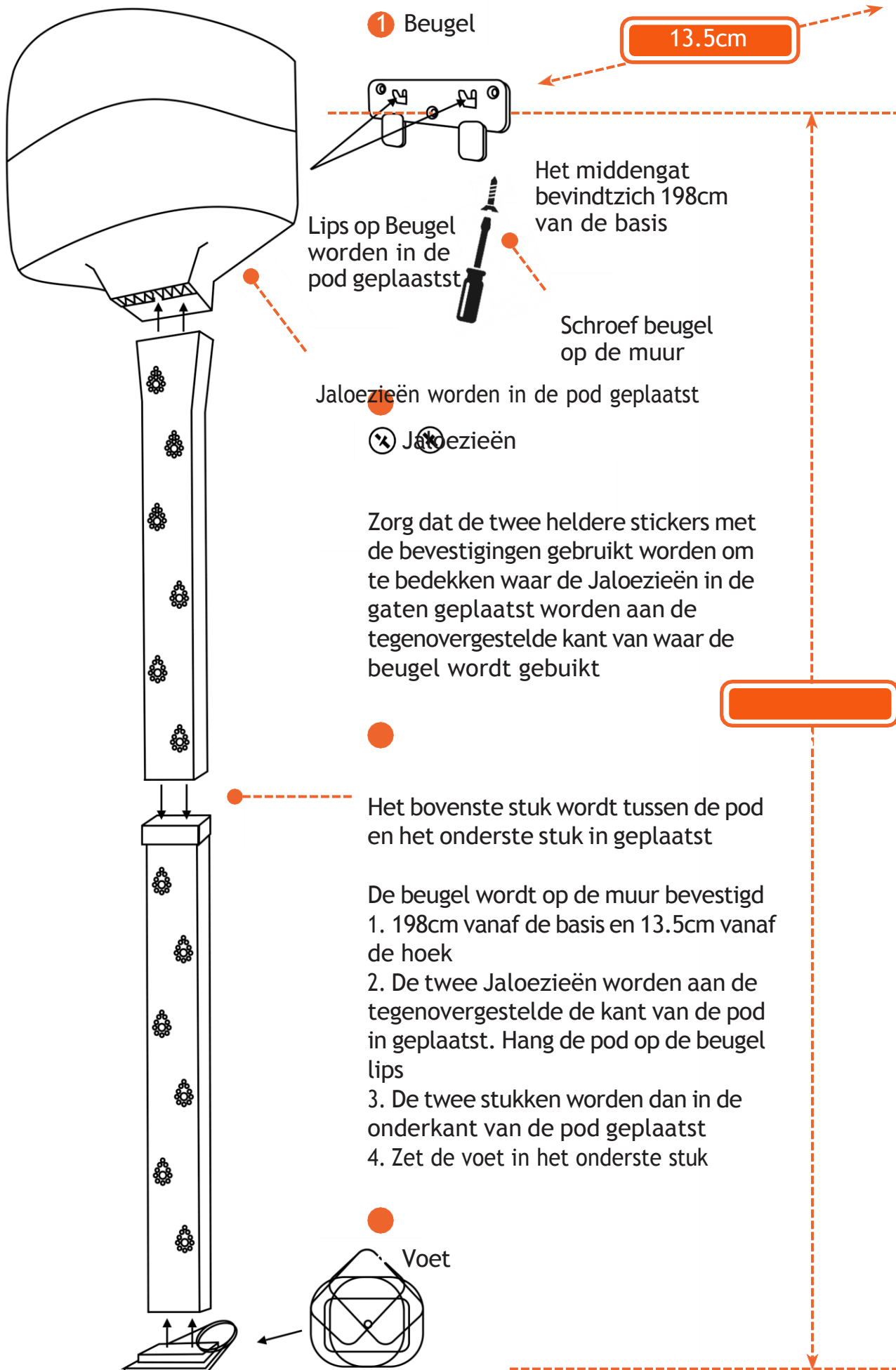

## Gecertificeerd elektriciens

Het installeren van dit apparaat moet uitgevoerd worden door een gecertificeerd elektricien die kan certificeren dat zijn werk voldoet aan de bouwvoorschriften NEN 10 10.



## Afdichting

Om een sterk en luchtdichte afdichting te vergemakkelijken, moet een dun stuk hittebestendig siliconen aangebracht worden rond de halsband voorafgaand van het bovenste stuk in plaats hebben bevestigd.



## Bevestigen

Niet-ijzerhoudend schroeven moeten altijd gebuikt worden om corrosie te voorkomen.



## Aanpassingen

De lengte van de droger stuk kan verminderd worden verschillende situaties te vergemakkelijken. Het onderste stuk kan verminderd worden met een maximum van 44cm, wij recomanderen om niet verder langs te snijden dan de druppelvormige gaten




## Afstandsbediening Bevestigen

Verwijder de bovenklep van de afstandsbediening.

Positioneer de basiseenheid van de afstandsbediening op de gewenste locatie en markering. Bevestig de schakelaar aan de muur.

Herplaats de bovenklep weer op de afstandsbediening.

De PVC verbinder moet geplaatst worden op het mondstuk van de afstandsbediening en het mondstuk van de pod.

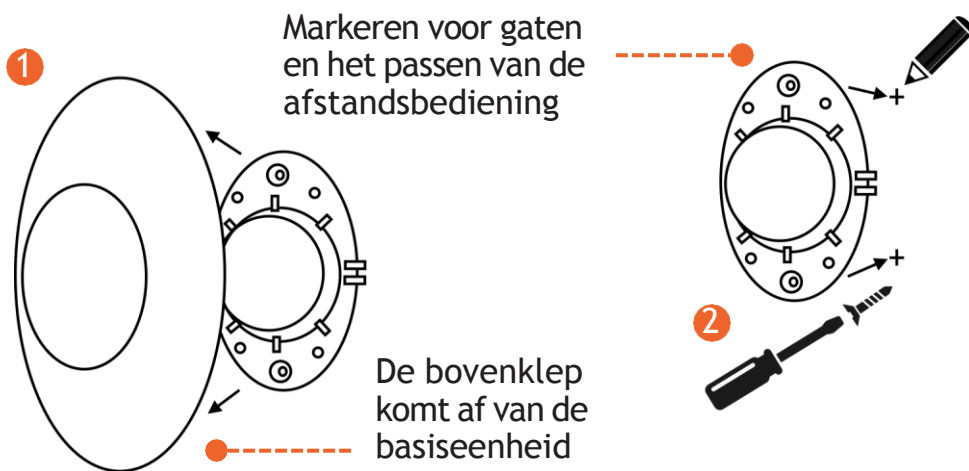

## Onderhoud

De droger kan afgeveegd worden met warm zeepwater of een wasmiddel van goede kwaliteit.

## Snelheid instellingen

Voor de beste resultaten, recomanderen wij om een keer te drukken voor een gematigd snelheid terwijl u doucht en nog een keer om de luchtstroom toe te laten nemen na het douchen.



## Recyclen

Het recyclen van uw oude elektrische apparaten is eenvoudig!



Recycle je elektrische en elektronische apparaten gratis bij je lokale recycle centrum. Of u kunt ze terugsturen naar doorverkopers die deelnemen aan het terugnameprogramma in de winkel.

Ongewenste elektrische apparaten is een groeiende soort afval.

Veel elektrische spullen kunnen gerepareerd of gerecycled worden, wat natuurlijke middelen en het milieu redt als u niet deze apparaten recycled zullen lekken wat water-en bodemverontreiniging veroorzaakt dit schaadt mens-en diergeveiligheid.

Om u te herinneren dat deze lichaamsdroger gerecycled kan worden, is het nu gemarkeerd met een doorgestreept prullenbak. Gooi alstublieft niet deze lichaamsdroger od andere elektrische apparaten (waaronder de doorgestreepte in uw prullenbak.





Temperatuur

De lichaamsdroger circuleert warme lucht steeds opnieuw, dus een verandering in ruimte, bijvoorbeeld het openen van de deur van je douche, verandert de omgevingstemperatuur.




x1 Snelheid



“druk een keer”  
gematigde luchtstroom

x2 Snelheid

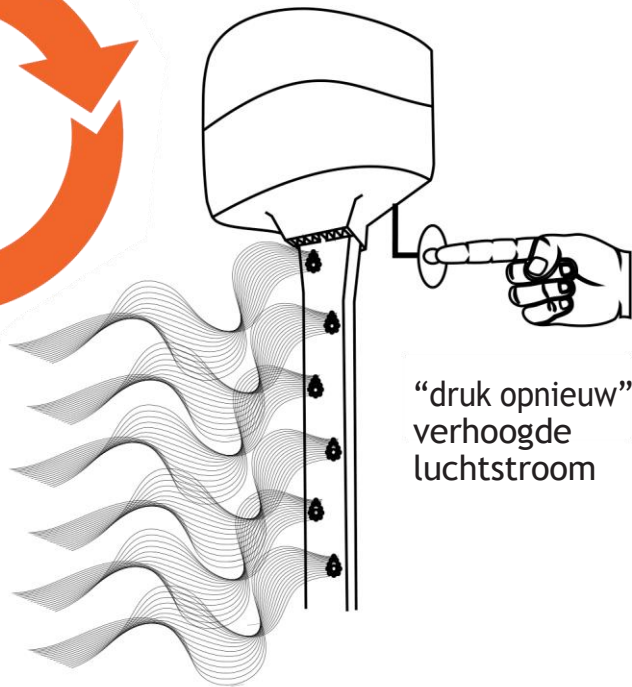

“druk opnieuw”  
verhoogde  
luchtstroom

Luchtstroom uit



“druk opnieuw”  
geen luchtstroom



## Veiligheid

Houd handen en vingers weg van bewegende onderdelen die zich bevinden binnen de pod.



Gebruik de droger niet tenzij het volledig samengesteld is.

Probeer niet de pod van de lichaamsdroger te openen.

Gebruik alleen de droger na volledige instructie, kennis en

## Technische Specificaties en EU Normen

Model IDRY1

Werkspanning 220/240V

Stroomsterkte 12.8 ampère

Uitvoer temperatuur 38°C\*

Eenheid grootte 205cm x 27.5cm x 26.5cm

Droogtijd 3 minuten

Snelheid functie 2

Goedkeuring CE

EU richtlijnen 2006/95/EC Laagspanning richtlijn 2014/35/EU

IP Waarde IPX4

\*Hangt af van kamertemperatuur. Uitvoer temperatuur kan 3-4°C omgevingstemperatuur zijn.

## Garantie

Uw nieuwe lichaamsdroger is gegarandeerd tegen de kostprijs van afbreuk reparaties twee jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop.

4

Wat valt er onder?

- Reparaties nodig als resultaat van defecte materialen, onderdelen of fouten van de fabrikant.
- Kosten van functionele vervangende onderdelen.
- De arbeidskosten van een monteur om reparaties uit te voeren.

Wat valt er niet onder?

- Accidentele schade en misbruik
- Extern of uiterlijke onderdelen waaronder afstandsbediening, PVC afstandsbediening verbinder, voet of de twee stukken.
- Reparaties nodig als resultaat van ongeoorloofd reparatie of ondeskundig installatie wat niet aan de vereisten voldoet binnen deze gebruikers handleiding.

Belangrijke notities

- De lichaamsdroger moet correct geïnstalleerd, gelegen en geopereerd worden in overeenstemming met de instructies binnen deze gebruiker handleiding.





