

LAVICTA



LAVICTA

body dryer

Voordelen Lavicta lichaamsdroger

LAVICTA
Remon Chedi | 18-02-2025



Veiligheid

- ✓ Verminderd valrisico omdat bewoners comfortabel stabiel blijven staan of zitten
- ✓ Spatwaterdicht ontwerp speciaal ontworpen voor de badkamer (IPX4-classificatie)
- ✓ Veilige luchtdruk knop voor bediening
- ✓ Verlichting van fysieke belasting: bewoners hoeven minder tot geen lastige/pijnlijke bewegingen te maken
- ✓ Geschikt voor diverse gebruikers van jong tot oud met verminderde lichamelijke en/of mentale capaciteiten
- ✓ Installatie door erkende elektromonteur

Comfort

- ✓ Handsfree drogen
- ✓ Constante warme luchtstroom over het hele lichaam om gelijkmatig te drogen
- ✓ Zacht voor de huid, ook voor gevoelige huid of huidaandoeningen
- ✓ Voorkomt irritaties of wrijving veroorzaakt door handdoeken
- ✓ Gebruiksgemak, door eenvoudige bediening ook geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit
- ✓ Snoezel ervaring, spa-gevoel

Verbeterde hygiëne

- ✓ Verminderde bacterie- en schimmelgroei (geen vochtige handdoeken)
- ✓ Optimale luchtkwaliteit (vochteffecten in de badkamer neemt af)
- ✓ Geen muffe geuren
- ✓ Snelle droging voorkomt huidproblemen en vermindert risico op huidirritaties of schimmelsinfecties
- ✓ Ook lastig bereikbare plekken worden gelijkmatig gedroogd
- ✓ Onderhoudsvriendelijk (minimaal onderhoud en eenvoudig schoon te maken)

Bevorderen zelfstandigheid

- ✓ Onafhankelijk drogen, ook voor gebruikers met beperkte mobiliteit
- ✓ Eenvoudige bediening, simpel zelfstandig gebruik
- ✓ Geen muffe geuren
- ✓ Vermindert fysieke belasting zoals buigen, bukken, draaien of kracht zetten
- ✓ Draagt bij aan meer zelfvertrouwen, eigenwaarde (privacy) door persoonlijke verzorging zelfstandig te kunnen doen
- ✓ Geschikt voor zorgomgevingen, ook in zorginstellingen kunnen bewoners langer zelfstandig functioneren

Voordelen zorgverleners

- ✓ Minder fysieke belasting en gezondere werkhouding: vermindert noodzaak om bewoners fysiek af te drogen. Helpt rug- en gewrichtsklachten te verminderen door herhaalde beweging te voorkomen
- ✓ Preventie van fysieke klachten bij zorgverleners: risico op blessures en overbelasting neemt af.
- ✓ Tijdsbesparing: meer tijd voor zorgverleners voor andere activiteiten en taken
- ✓ Meer privacy voor bewoners: positief voor welzijn en zelfvertrouwen
- ✓ Bevordert zelfstandig wonen, ook in zorginstellingen waardoor de behoefte aan hulp van zorgverleners kan afnemen
- ✓ In het algemeen: betere kwaliteit van zorg door eigen regie te bevorderen in combinatie met verlaging van zorgdruk
- ✓ Een middel om de levenskwaliteit te verbeteren

Besparing

- ✓ Verlaging zorgkosten: bewoners hebben langer eigen regie op zelfverzorging waardoor kan worden bespaard op extra zorg- en hulpkosten
- ✓ Personeelkosten en ziekteverzuim: door vermindering van fysieke taken zoals afdrogen of ondersteunen bij afdrogen neemt het risico op blessures en overbelasting af wat kan leiden tot minder ziekteverzuim en lagere kosten voor vervangend personeel
- ✓ Vermindering zorguren: afname behoefte persoonlijke verzorging
- ✓ Vermindering zorgvraag: meer zelfstandigheid & zelfvertrouwen
- ✓ Besparing kosten wassen en drogen handdoeken en ook vervanging



Samenvattend

1. Zorg behoevende bewoners staan centraal
 - Comfort
 - Hygiënisch
 - Zelfstandigheid/eigen regie in zelfverzorging
 - Minder fysieke belasting
2. Ontlasten van zorgverleners
 - Efficiëntere zorgplanning
 - Arbo technisch verantwoord
 - Tijd- en kostenbesparend
 - Bijdragen aan verbeterde kwaliteit van leven
3. Duurzaam
 - Reduceert water gebruik
 - Reduceert stroomgebruik
 - Lange levensduur apparaat
 - Draagt bij milieuvriendelijk zorgomgeving

LAVICTA

body dryer

Toelichting gebruik





Gebruiksaanwijzing lichaamsdroger

Stap 1

Voordat u gaat douchen, druk op de knop om de badkamer op te warmen.

Stap 2

Bent u klaar met douchen? Dan kunt u zichzelf stand of zittend positioneren voor de lichaamsdroger.

Stap 3

Druk vervolgens nogmaals op de knop voor de droogstand en geniet van de warme luchtstroom over uw lichaam. In een paar minuten bent u helemaal droog.

Stap 4

Druk nogmaals op de knop en de droger gaat uit



Hoe moet de lichaamsdroger gebruikt worden?

1. De lichaamsdroger droogt comfortabel zonder moeilijke bewegingen te maken. De lichaamsdroger biedt veilig en handsfree drogen zonder hulp.
2. Maak tijdens het drogen contact met uw eigen lichaam met de handen zoals onder de oksels, tussen de liesstreek, onder de borsten om smetplekken te voorkomen. Goede voorlichting geven en gebruik aanpassen aan de bewoners bijvoorbeeld met een extra beugel voor houvast of een douche stoel
3. Advies om elke dag te blijven gebruiken zodat iedere bewoner een eigen methode ontwikkeld.

LAVICTA

body dryer

Ervaringen

LAVICTA
Remon Chedi | 18-02-2025



HET VERHAAL VAN TONNIE:



HET VERHAAL VAN MARLEEN:



HET VERHAAL VAN JUDITH:



HET VERHAAL VAN LINDA:



LAVICTA

body dryer

Vragen?

 **LAVICTA**
Remon Chedi | 18-02-2025